


使用 DentalCAD、ChairsideCAD 或 exoplan (已激活) 获取加密狗序列号

1. 将加密狗插入个人电脑或笔记本电脑。
2. 运行 DentalCAD 应用程序
../DentalCADApp/bin/DentalCADApp.exe


或 ChairsideCAD 应用程序
.../ChairsideCAD/bin/DentalCADApp.exe

或 exoplan 应用程序
.../ImplantPlanning/bin/ImplantPlanning.exe

3. 点击屏幕右侧主菜单中的 **Tools**。
4. 点击 **About**。

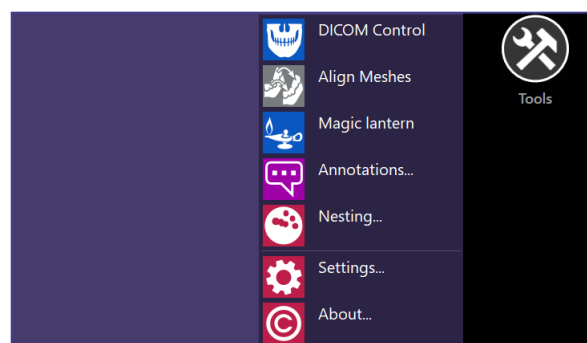

5. 点击 **Copy** 将序列号复制到剪贴板。

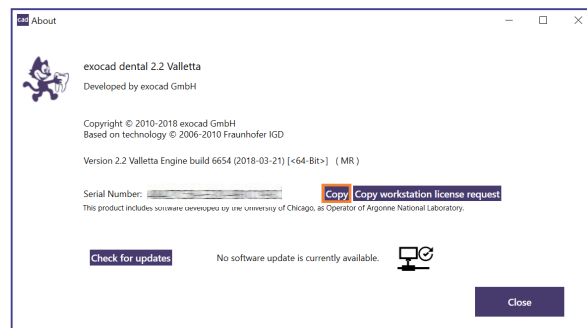

使用 DentalCAD、ChairsideCAD 或 exoplan (尚未激活) 获取加密狗序列号

1. 将加密狗插入个人电脑或笔记本电脑。
2. 运行 DentalCAD 应用程序
../DentalCADApp/bin/DentalCADApp.exe

或 ChairsideCAD 应用程序
.../ChairsideCAD/bin/DentalCADApp.exe

或 exoplan 应用程序
.../ImplantPlanning/bin/ImplantPlanning.exe
3. 然后会出现一个对话框，提示您激活软件。序列号会显示在此窗口中。
4. 按住 **CTRL** 和 **C** 键，将文本粘贴到任何文档中，并复制序列号。

